

CIRUS +

Leírás

Fényre kötő nano-hybrid kompozit, magas töltöttségi arány. Anterior és posterior restaurációkhoz. Valamint I, II, III, IV és V.osztályú restaurációk.

Összetétel

Szerves mátrix: Bis-GMA - TEGDMA

Töltő anyagok: Baryum silanizált üvegrészecskék(80%), nano szilikát töltő anyag.

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

- A CIRUS+ polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az ornyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat.
- Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
- Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.
- Bőrzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.
- Kerülje a szájnálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések

- Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallatok

A CIRUS+ használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. Ne használja a CIRUS +-t megnyílt pulpa és pulpitisz esetén.

Használati utasítás:

- Válassza ki a megfelelő VITA árnyalatot természetes fénynél.
- Készítse elő a fogüreget a hagyományos módon.
Készítse elő a széleket az okkluzális felületen, hozzon létre vékony domborulatot az interproximális üregben.
- II, III és IV. osztályú töméseknél használjon matricát és éket a szélek kialakításához, mielőtt az üregbe helyezi az anyagot.
- Amikor a pulpa üreg zárva van, használjon eugenol mentes kavitás alapozót (pl.: Kalcium hydroxide, antibakteriális alapozó).
- Az előkészületeknél kövesse a gyártó utasításait és ha teheti használjon fényre kötő bondot vagy önsavazó bondot.
- A CIRUS+ fényre kötő kompozitot rétegezve használja, ami nem több mint 2,5 mm vastag, ezzel minimalizálva az anyag zsugorodását. A kötési idő 2,5 mm-nél a világosabb árnyalatoknál 40 másodperc (A1, A2,A3, C2) és 60 másodperc a sötétebb árnyalatoknál (A3,5, B3).
- Miután a matricát és az éket eltávolította, a buccális és a lingvális részről is távolítsa el a fényre kötő anyagot.
- Finírozza, polírozza a restaurációt.

Tárolás

Ne tegye ki közvetlen napfénynek és forróságnak. Soha ne tárolja a CIRUS+-t eugenolt tartalmazó termékek közelében. 23°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a CIRUS+ 24 hónapig felhasználható.

Kiszerezés & referenciaszám

PUR- 3* - 3g fecskendő. Elérhető a következő VITA színárnyalatokban: A1/B1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, C2.

PUR- 5* - Dobozonként 20 x 025 g kapszula, Elérhető a következő VITA színárnyalatokban: A2, A3, A3,5, B2.

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetett hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.