

PHOENIX MD

Leírás

Ideiglenes korona és híd anyag 50 ml-es tubusban, kiváló mechanikai tulajdonságokkal. Thixotrop, használható közvetlenül szájból a fog felépítésére ha szükséges.

Fizikális adatok/ az anyag karakterisztikája

Megmunkálási idő + szájon belüli kötési idő: 2' 25" – 2' 40"

Biztonsági jegyzet

Figyelmeztetés!

A **PHOENIX MD** polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az ornyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél allergiás kontakt dermatitist okozhat.

Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz.

Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal töröljék le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel.

Bőrzérékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz.

Kerülje a szájnálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések

Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget.

Ellenjavallatok

A **PHOENIX MD** használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre.

Használati utasítás:(indirekt eljárás)

- Vegyen egy tanulmányi lenyomatot. Távolítsa el az interdentalis részekből a szilikon anyagot.
- Preparálja a fogat.
- Távolítsa el a védő kupakot, ellenőrizze a két nyílást, hogy nincs –e eltömődve.
- Helyezze fel a sárga keverő csőrt a tubusra.
- Helyezze be a tubust a keverő pisztolyba.
- A tubus első használatánál nyomjon ki egy kis mennyiséget egy keverő papírra, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két anyag egyforma arányban jön a tubusból. Dobja ki a kinyomott anyagot.
- Szárítsa ki a lenyomatot és töltsse fel a területet PHOENIX MD-vel. Mindig töltsse fel teljesen, amíg a lenyomat tele nem lesz. Ajánlott befecskendezni egy kis mennyiségű anyagot az érintet fog szulkuszába az intraorális csőrrel, ezzel elkerülhető az ideiglenes korona szélének hiányossága.
- Helyezze vissza a páciens szájába a lenyomatot és hagyja megkötni az PHOENIX MD-t 40-45 másodpercig.
- Vegye ki a szájból a lenyomat kanalat. Ebben a fázisban az anyag még rugalmas, vágja körbe az alamenős részeket.
- Az anyag végleges kötési ideje több mint 2 perc.
- Távolítsa el a megkötött fogművet és vágja körbe.
- Távolítsa el a maradék anyagot (ha van ilyen) egy alkoholos vattagombóccal.
- Polírozza ha szeretné, használjon habkövet és polír pasztát.
- Ragassza be az ideiglenes fogművet ideiglenes cementtel (pl.: Seal Temp vagy Seal Temp S).
- Használat után Tartsa a keverő csőr végét a tubuson, ezzel védve tubust a következő használatig.

Használati utasítás: (direkt eljárás)

Összehasonlítva más hasonló anyagokkal, a PHOENIX MD nem folyik. Ha nem megoldható, hogy tanulmányi lenyomatot vegyen, akkor a PHOENIX MD-t közvetlenül tudja használni a preparált fogon, hogy tökéletes ideiglenes koronát kapjon legalább 3 perc kötési idő szükséges.

Fecskendezze a PHOENIX MD-t közvetlenül a sulcusba és a preparált fogra (tartsa kicsit nedvesen).

- Amint a fogat teljesen befedte, kérje meg a páciens, hogy csukjon össze.
- 30 másodperc elteltével az anyag rugalmassá válik. Vegye le az ideiglenes koronát a preparált fogról, és párszor tegye vissza, ezzel elkerülve azt, hogy az ideiglenes korona beszoruljon az interproximális részekbe.
- Vízszög alatt vágja le gyémánt fúróval a felesleges részeket.
- Ragassza be az ideiglenes fogművet ideiglenes cementtel (pl.: Seal Temp vagy Seal Temp S).

Tárolás és eltarthatóság

25°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a PHOENIX MD 24 hónapig felhasználható. Hosszú ideig ne tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). Ha hideg az anyag, akkor merevebb az állaga. A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarabb vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot.

Kiszerezés

PHOENIX MD - 50ml dual tubus + 10 db sárga keverő csőr

RAP-A3-50 (A3 fogszín)

RAP-A2-50 (A2 fogszín)

RAP-A1-50 (A1 fogszín)

Fontos utasítások

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak.
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt.
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.

Utasítás

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot.